Produktdatenblatt/Technisches Datenblatt

RescueClean W2 Desinfektionstücher



Die Rescueclean W2 Desinfektionstücher sind gebrauchsfertige, alkoholische Desinfektionstücher zur Desinfektion von alkohol-beständigen Oberflächen und Gegenständen in allen hygienisch kritischen Bereichen. Ideal, wenn praxisgerechte Einwirkzeiten erforderlich sind und überall, wo eine rückstandfreie Fläche nach der Desinfektion verbleiben soll. Die Wirksamkeit gegen Bakterien, Pilze und Viren ist sehr umfangreich und gem. RKI als begrenzt viruzid PLUS eingestuft.

Die Wischtücher sind sofort einsatzbereit. Die Oberfläche mit dem Tuch sorgfältig wischen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen und die Fläche ggf. vorreinigen. Nach Tuchentnahme Verpackung wieder gut verschließen. Nur feuchte Tücher für die Desinfektion verwenden.

- | bakterizid, levurozid, tuberkulozid und mykobakterizid, inkl. MRSA
- | wirksam gegen behüllte Viren wie z. B. HCV/HBV/HIV und Influenza sowie Corona
- wirksam gegen unbehüllte Viren wie z.B. Adeno und Noro
- | begrenzt viruzid PLUS gem. RKI
- schnelle, rückstandsfreie Abtrockung

Artikelnummern:

113935, 100 Stk. im Spendereimer 113936, 100 Stk. Refill-Beutel für Eimer

Inhaltsstoffe:

Wirksame Bestandteile in 100g: 50g Ethanol, weitere Bestandteile: Hilfsstoffe, VE-Wasser

Gutachten/Normen:

Dermatest sehr gut Vier-Felder-Test

Einwirkzeiten gem. VAH und EN-Normen:

60 Sek. Tuberkulose 60 Sek. 60 Sek. Adeno Vaccinia 60 Sek. Noro 60 Sek. MRSA 30 Sek. Salmonellen 30 Sek. Listerien 30 Sek. Corona 30 Sek.

Biozide sicher verwenden.

Vor Gebrauch steht Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

